


Gebrauchsanweisung Users' guide

MAXLUPE MINI

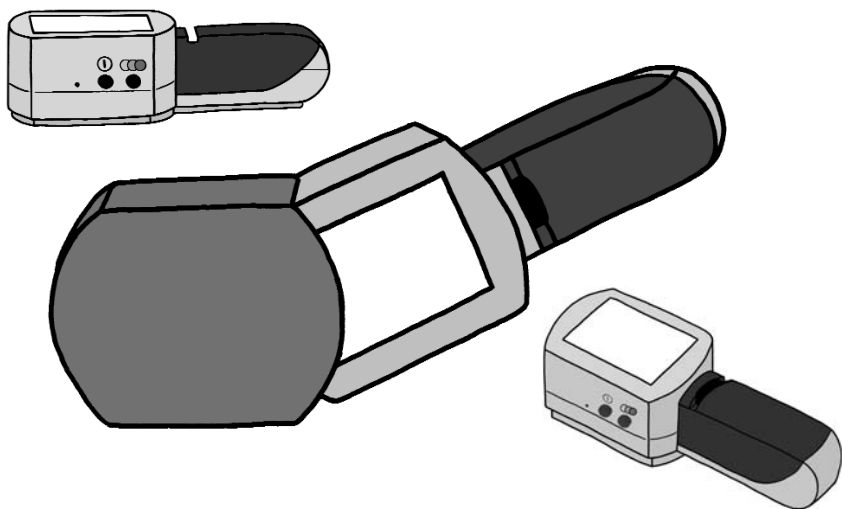

MINI PLUS



Konformitätserklärung

Wir,

Reinecker Reha-Technik GmbH
Sandwiesenstraße 19
D- 64665 Alsbach-Hähnlein
Telefon +49 (0) 6257 9311-0

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

MAXLUPE MINI
MAXLUPE MINI PLUS

den Bestimmungen folgender Richtlinie entspricht:

EN 60950 - 1:2001
ETS 300 683
EN 300 440-2V1.1.109-200

Die CE-Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung.

Alsbach-Hähnlein

Bernd Reinecker, Geschäftsführer

01. Januar 2005.....

.....


Ort, Datum der Ausstellung

Name und Unterschrift des Befugten

Inhalt

Wichtige Hinweise für den Betrieb von MAXLUPE MINI / MINI PLUS	9 -10
Lieferumfang	11
Allgemeine Hinweise	11
Arbeitsweise / Anwendungen	11
Aufstellung und Anschluss	12
Netzbetrieb mit Steckernetzteil	12
Akku-Betrieb	13
Laden der Akkus	14
Aufladezeit der Akkus	14
Achtung! Gebrauch der Akkus	15
Austausch der Akkus.	15
Sachmangelhaftung Akkus	15
Bedienelemente.	16
Ansicht oben MAXLUPE MINI PLUS	16
Seitenansicht vorne MAXLUPE MINI PLUS	16
Ein-Ausschalter	17
Farbwahl	17
Einstellung der Vergrößerung.	18
LED Anzeige	18
Allgemeine Informationen zur Funkübertragung der (MAXLUPE MINI PLUS)	19
Anschluss des Funk-Empfängers an Ihr TV-Gerät	20
Einschalten des Senders und Funkbetrieb	20

Betrieb mit Funkübertragung.	21
Bildeinstellung am TV-Bildschirm	22
Ausalten des Funkbetriebes	22
Alle Scartbuchsen an Ihrem TV-Gerät sind belegt	22
Schutz des TFT-Bildschirmes	23
Reinigung des TFT-Bildschirmes	23
Vorsichtsmaßnahmen bei der Änderung.	23
der Leistung des Produktes	23
Sicherheitshinweise.	24
Hinweise zu Transport und Lagerung	24
Service-Nummer	24
Technische Daten	25
Besondere Sachmangel- und Garantiebestimmungen	26
Gerätebuch	27

Wichtige Hinweise für den Betrieb von Maxlupe mini/MINI PLUS

–Lesen Sie diese Hinweise vor Gebrauch des Systemes –

1. Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Die **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** ist geeignet für den Gebrauch in allen Einrichtungen einschließlich des Wohnbereiches und solchen, die direkt an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude für Wohnzwecke versorgt.

Die **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** ist für den Betrieb in der angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Betreiber sollte sicherstellen, dass es in der beschriebenen Umgebung benutzt wird.

Die **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** benutzt HF-Energie ausschließlich für seine eigene Funktion. Deshalb ist die Störaussendung hochfrequenter Störgrößen sehr gering und die Möglichkeit, andere in der Nähe betriebenen Geräte zu stören, ist unwahrscheinlich.

Trotzdem sollte berücksichtigt werden, dass ein gemeinsamer Betrieb des Systemes mit anderen Geräten zu Störungen führen kann.

Daher sollte darauf geachtet werden, dass das System nicht unmittelbar neben oder auf einem anderen Gerät angeordnet werden darf.

Wenn sich eine Anordnung der opto-elektronischen Geräte in unmittelbarer Nähe zu medizinischen, analogen Messgeräten nicht vermeiden lässt, muss der Anwender dieser Messgeräte darauf hingewiesen werden, dass eine Beobachtung der Geräteergebnisse notwendig ist, um den bestimmungsgemäßen Gerätegebrauch in der gewählten Anordnung zu überprüfen.

Elektronische Geräte sind empfindlich gegen elektrische Entladung und gegen hochfrequente elektromagnetische Felder.

Um Störungen des Systemes durch HF-Störgrößen zu vermeiden, sollte der Anwender einen Mindestabstand zu tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten von einem Meter einhalten.

1. Gemeinsamer Betrieb mit anderen Geräten

Warnhinweise:

Die **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** darf nicht unmittelbar neben oder auf einem anderen Gerät angeordnet werden.

Der Anwender ist zu unterweisen, dass beim Betrieb in unmittelbarer Nähe eines anderen Gerätes eine Beobachtung der Geräteergebnisse notwendig ist, um den bestimmungsgemäßen Gerätegebrauch in der gewählten Anordnung sicherzustellen.

2. Installation und Wartung

Installation und Wartung müssen EMV- fachgerecht durchgeführt werden. Detaillierte Angaben sind Geräte- und System spezifisch.

3. Gerätereinigung

- a) Vor dem Reinigen des Gerätes ist dieses von der Stromversorgung zu trennen.
- c) Den Bildschirm des Monitors sowie das Gesamtgerät mit einem Glasreiniger reinigen.
- b) Es dürfen beim Reinigen keinerlei Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.


5. Folgende Lager- und Transportbedingungen sind einzuhalten:

- Temperaturbereich -10 bis +50°C
- Relative Luftfeuchtigkeit 30% bis 80%, nicht kondensierend.
- Luftdruck 700-1000 hPa

6. Umweltfreundliche Entsorgung nach EU Richtlinie 2002/96/EG

Das Gerät beinhaltet elektronische Bauelemente.

Um Umweltrisiken oder Gefährdungen durch nicht fachgerechte Entsorgung zu verhindern, muss die Entsorgung des Produktes, einschließlich des Zubehörs den gültigen Richtlinien entsprechen.

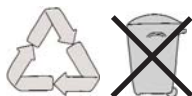

Lieferumfang

- **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** mit Display und integrierten Akkus
- Steckernetzteil
- Tragegurt
- Etui
- Reinigungstuch
- Gebrauchsanweisung
- Empfänger

Allgemeine Hinweise

MAXLUPE MINI / MINI PLUS ist eine opto-elektronische Video-lupe zum Vergrößern von Text- und Bildvorlagen. Wegen ihrer Handlichkeit, ihrer geringen Größe, ihres geringen Gewichts und des Betriebes mit Akkus eignet sich **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** besonders für die verschiedensten Anwendungen im Alltag oder im geschäftlichen Bereich, sowie auf Reisen.

Arbeitsweise/Anwendungen

Text oder Bilder werden über Spezialobjektive von einer CCD-Farbkamera aufgenommen und als Echtfarb-, Schwarz-,Weiß- oder Fehlfarbenbild auf dem TFT-Bildschirm mit hoher Helligkeit dargestellt.

Das geringe Eigengewicht und die Gleitfolie erleichtern das Führen der **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** über das Lesegut.

MAXLUPE MINI / MINI PLUS ist sowohl für den Akku-Betrieb als auch den Netzbetrieb entwickelt worden.

MAXLUPE MINI / MINI PLUS hat zwei Vergrößerungsstufen.

Anmerkung!

Die Kamera, die die Lesevorlage oder das Bild aufnimmt, ist symmetrisch zum Display angeordnet.

Kamera und Display haben zur Text- oder Bildvorlage die gleiche Position. Dies erleichtert wesentlich das Auffinden der Text- oder Bildausschnitte, die vergrößert werden sollen.

Aufstellung und Anschluss

MAXLUPE MINI / MINI PLUS ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen ausgelegt. Der TFT-Bildschirm ist mit einem entspiegelten Schutzglas ausgestattet. Dennoch sollte **MAXLUPE MINI PLUS** weder direkter Sonneneinstrahlung noch direktem Licht ausgesetzt sein, um auf der einen Seite störende Reflexe auf dem Bildschirm und auf der anderen Seite unzulässige Erwärmung zu vermeiden.

MAXLUPE MINI / MINI PLUS kann sowohl mit den integrierten Li-Ionen-Akkus als auch am Netz betrieben werden.

Bei Netzbetrieb wird **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** von einem speziellen Steckernetzteil versorgt.

Netzbetrieb mit Steckernetzteil

Am Ende des Handgriffes befindet sich eine Öffnung für das Einstecken des Miniatursteckers des Steckernetzteils. Das Steckernetzteil selbst wird an eine Schuko-Steckdose angeschlossen. Nach dem Einschalten **①** ist **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** betriebsbereit. Die Anzeige im Ein-Ausschalter leuchtet grün auf.

MAXLUPE MINI hat keinen integrierten Sender, **MAXLUPE MINI PLUS** ist mit einem Sender und einem Empfänger ausgestattet. Somit können Vorlagen mittels Funkübertragung auf einem TV Gerät dargestellt werden.

(Siehe Beschreibung Seite 19-20)

Akku-Betrieb

MAXLUPE MINI / MINI PLUS ist mit hochwertigen LI-IONEN-Akkus bestückt. Sie gewährleisten bei richtiger Handhabung eine lange Lebensdauer.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

- **Erst-Inbetriebnahme im Akku-Betrieb:**

Bei der ersten Inbetriebnahme überprüfen, ob die Akkus vollgeladen sind. Schließen Sie das Steckernetzgerät an und schalten Sie **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** aus. Leuchtet die orange Kontrollleuchte auf, sind die Akkus solange über das Steckernetzteil zu laden, bis die Ladeanzeige erlischt (siehe Kapitel „Laden der Akkus“). Die Akkus sind nun voll geladen. Entfernen Sie die Zuleitung des Steckernetzteiles an **MAXLUPE MINI / MINI PLUS**. Beim Einschalten leuchtet nun die grüne Kontrollleuchte im Ein-Ausschalter auf. **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** ist im Akku-Betrieb betriebsbereit.

- **Betriebszeit:**

Bei einem Akku über 2,5 Std.
bei zwei Akkus über 5 Std.

- **Restbetriebszeit (rote LED Anzeige):**

Hat der Akku nur noch eine Restbetriebszeit von ca. 20 Minuten, wird dies über die rote LED Anzeige signalisiert. Es ist erforderlich, die Akkus schnellstmöglich zu laden.

Achtung!

Werden die Akkus während der roten LED Anzeige nicht geladen, schaltet nach dem Erlöschen der roten LED **MAXLUPE MINI/MINI PLUS** alle Funktionen ab.

Dies ist notwendig, um eine Tiefentladung und somit die Zerstörung der Akkus zu vermeiden.

Laden der Akkus

Die Akkus werden geladen, wenn das Netzteil über den Miniaturstecker des Steckernetztes an der **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** angeschlossen ist und das Steckernetzteil in der Steckdose steckt.

Achtung!

Die MAXLUPE MINI / MINI PLUS muss zum Laden ausgeschaltet sein.

Während des Ladevorganges leuchtet die LED Anzeige orange auf. Sind die Akkus voll geladen, erlischt diese Anzeige. Längere Ladezeiten schaden den Akkus nicht.

Nun kann **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** vom Steckernetzteil getrennt werden. **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** ist betriebsbereit.

Aufladezeit der Akkus

Die Aufladezeit eines Akkus beträgt ca. 1,5 Stunden.
Die Aufladezeit von zwei Akkus beträgt ca. 3 Stunden.

Achtung!

Gleichzeitiges Laden der Akkus und der Betrieb von **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** ist nicht möglich.

Achtung! Gebrauch der Akkus

Vorraussetzung für eine lange Lebensdauer der Akkus ist das korrekte Einhalten der Anweisung zum Betrieb und Laden der Akkus:

- Der Ladevorgang der Akkus darf erst beendet werden, wenn die gelbe Kontrollleuchte erloschen ist.
- Sollte **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** längere Zeit nicht benutzt werden, so sind die Akkus voll aufzuladen, da diese auch bei ausgeschalteter **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** ihre Ladung verlieren und es zur Tiefentladung der Akkus kommen kann. Dies ist zu vermeiden, da die Akkus Schaden nehmen.

Prüfen Sie immer den Ladezustand der Akkus und laden Sie diese gegebenenfalls - wie beschrieben - auf!


Austausch der Akkus

Die Akkus dürfen nur von Reinecker Reha-Technik GmbH oder einem autorisierten Fachhändler ausgetauscht werden.

Es dürfen nur die Originalakkus eingesetzt werden.

Diese sind unter der Artikelnummer 00354001 bei Reinecker Reha-Technik GmbH zu beziehen. Der Einsatz anderer

Akkutypen zerstört **MAXLUPE MINI / MINI PLUS**. Es erlischt die Sachmangelhaftung für **MAXLUPE MINI / MINI PLUS**.

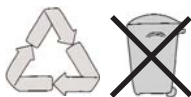


Sachmangelhaftung Akkus


Akkumulatoren unterliegen einem naturbedingten Verschleiß und sind somit von der allgemeinen Sachmangelhaftung ausgeschlossen.

Bedienelemente

Ansicht oben MAXLUPE MINI / MINI PLUS

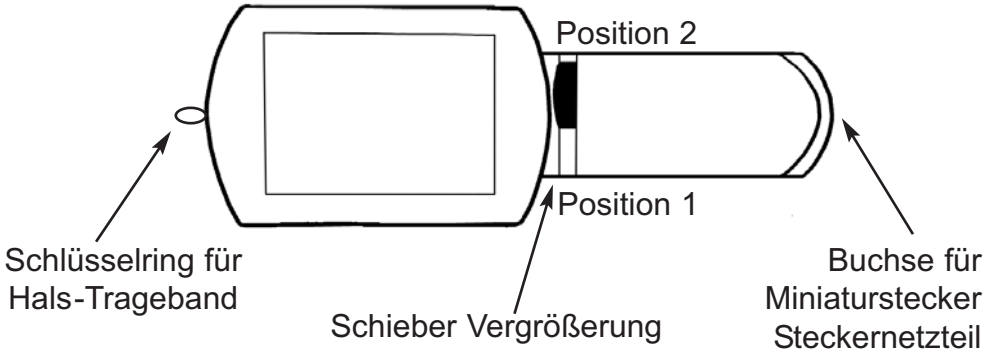

Seitenansicht vorne MAXLUPE MINI / MINI PLUS

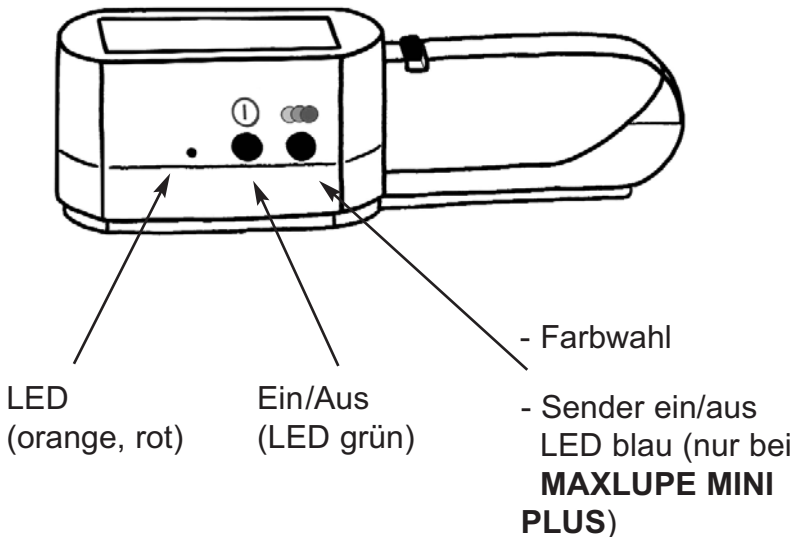



Ein-Ausschalter

Den Einschalt-Zustand erkennt man am Aufleuchten der grünen Kontrolllampe im Ein-Ausschalter.

Achtung!

Bei Betrieb der **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** mit dem Stecker-Netzteil ist zu beachten, dass durch das Ein- bzw. Ausschalten lediglich die 12 Volt Versorgungsspannung unterbrochen wird.

Um die **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** endgültig vom Netz zu trennen, ist das Steckernetzteil aus der Steckdose zu ziehen.

Farbwahl



Durch Drücken des Tasters Farbwahl ändert sich die Farbdarstellung in folgender Reihenfolge:

- Echtfarbe
- Schwarz/Weiß-negativ (kontrastverstärkt)
- Schwarz/Weiß-positiv (kontrastverstärkt)
- Grün-negativ
- Gelb-negativ
- Gelb/blau-negativ

Anmerkung:

Die Monochromwiedergabe der Fehlfarben ist nur zum Lesen von Schriften geeignet. Nach dem Ausschalten von **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** bleibt die zuletzt angewählte Einstellung der Farbdarstellung gespeichert.

Einstellung der Vergrößerung


MAXLUPE MINI / MINI PLUS hat 2 Vergrößerungsstufen zur Auswahl, die durch Verstellen des Objektivschiebers wie folgt ausgewählt werden können:

- In Position 1 beträgt die Vergrößerung auf dem Display 4-fach.
- In Position 2 beträgt die Vergrößerung auf dem Display 8-fach.

LED Anzeige

Die LED Anzeige befindet sich links neben dem Ein-Ausschalter.


- LED leuchtet rot: Achtung! Betriebszeit nur noch ca. 20 Minuten! Laden Sie die Akkus!
- LED leuchtet orange: Siehe Kapitel „Laden der Akkus“.

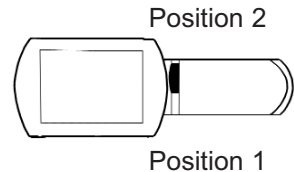

Allgemeine Information zur Funkübertragung für MAXLUPE MINI PLUS

Das Funkübertragungssystem besteht aus einem Funksender und einem Empfänger. Die Funkfrequenz des Senders liegt im 2,4 GHz-Bereich. Dieses Frequenzband ist zur allgemeinen Nutzung für Video und Audioübertragung freigegeben.

Der Sender hat eine Sendeleistung, die innerhalb eines Raumes ca. 10 m beträgt.

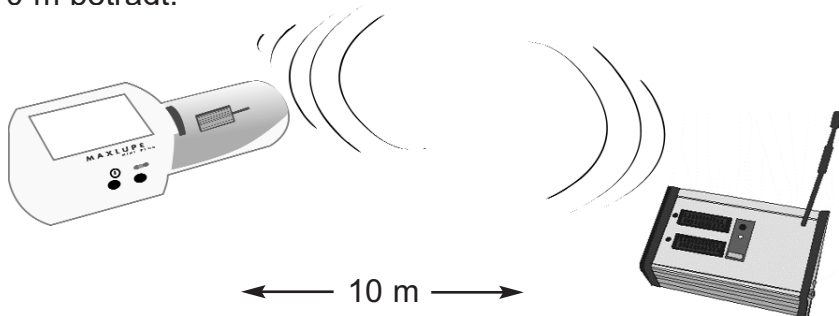

Zur Verhinderung von Störungen sind neben dem Abstand von Sender zum Empfänger auch sich dazwischen- befindlichen Gegenstände wie Mauern, Schränke usw. von Bedeutung. Ebenso können durch andere elektrische Geräte wie Mikrowellen, Föhne, Handys/ Funktelefone Störungen auftreten.

Die Frequenz ihres Funkübertragungssystems werden auch von anderen Anwendern genutzt.

Mit zeitweiligen Störungen im Betrieb ist somit zu rechnen. Suchen Sie sich im Raum den Platz, der Ihnen den besten Empfang sichert.

Betrieb mit Funkübertragung

Entnehmen Sie den Empfänger sowie das beiliegende Scartkabel und **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** aus der Verpackung.

Machen Sie sich zuerst mit der **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** mit Hilfe der Gebrauchsanweisung vertraut.


Anschluss des Funk-Empfängers an Ihr TV-Gerät

- Stellen Sie den Empfänger neben das TV-Gerät.
- Verbinden Sie mit dem Scartkabel den Scarteingang des TV z. B. AV1 mit der Scartbuchse SCART OUT des Empfängers.
- Stecken Sie das Steckernetzgerät des Empfängers in eine dem Stand entsprechende Schuko-Steckdose.
- Schalten Sie den Empfänger mit dem Einschalter am Empfangsgerät ein, die grüne LED leuchtet.
- Schalten Sie das TV -Gerät ein.
- Schalten Sie MAXLUPE MINI PLUS ein.


Einschalten des Senders und Funkbetrieb

- Der Funksender befindet sich im Gehäuse von Maxlupe MINI PLUS.
- Legen Sie eine Lesevorlage unter **MAXLUPE MINI /MINI PLUS**.
- Schalten Sie MAXLUPE MINI PLUS ein.
Drücken Sie die Taste **Farbwahl ca. 3 Sekunden lang**, der Sender ist eingeschaltet, die LED in der Taste Farbwahl leuchtet blau auf.
- (Kontrolle Sender eingeschaltet)
Die orange Kontrollleuchte am Empfänger leuchtet auf
- (Kontrolle Empfänger aktiv)
Das TV-Gerät schaltet automatisch von normalem Fernsehempfang auf Funkempfang -gesteuert
- über die Scartbuchse- um.
Der Ausschnitt der Lesevorlage wird nun vergrößert auf
- dem Bildschirm des TV-Gerätes dargestellt.
Der TFT-Bildschirm von Maxlupe MINI PLUS wird ausgeschaltet.


Scartstecker

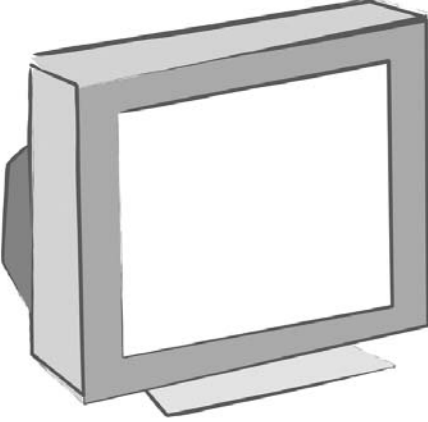

Netzstecker

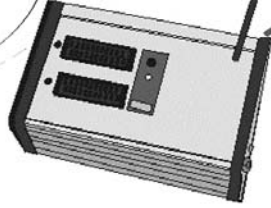

Empfänger

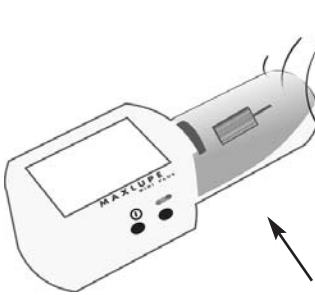

Funksender
(im Gehäuse)

Bildeinstellung am TV-Bilschirm

Über die Bedienelemente der Maxlupe MINI PLUS (Vergrößerung und Farbwahl) und den Einstellmöglichkeiten an dem TV-Gerät (Helligkeit und Farbsättigung über die Fernbedienung) können Sie die Bildeinstellung optimieren und nach Ihrem Empfinden einstellen.

Ausschalten des Funkbetriebes

Wenn Sie den Funkbetrieb ausschalten möchten, drücken Sie die Taste **Farbwahl ca. 3 Sekunden**. Der Funkbetrieb schaltet aus, die blaue LED im Taster Farbwahl erlischt ebenso wie die orange LED am Empfänger. Das TV-Gerät schaltet auf normalem Fernsehempfang um. MAXLUPE MINI PLUS ist wieder betriebsbereit, auf dem Display ist der Ausschnitt der Vorlage vergrößert abgebildet.

Alle Scartbuchsen an Ihrem TV-Gerät sind belegt

Sollten die Scartbuchsen an Ihrem TV-Gerät belegt sein und Sie möchten dennoch ein Funksystem an das TV-Gerät anschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie eine Scartverbindung an Ihrem TV-Gerät z. B. AV 1 der eventuell vom Videorecorder kommt und stecken Sie diesen Scartstecker der vom Videorecorder kommt in die Buchse "SCART IN" des Funk-Empfängers.
- Stellen Sie dann eine Scart Verbindung von "SCART OUT" des Funk-Empfängers zum TV-Gerät der Scart Buchse AV1 her. Somit ist das Signal vom Videorecorder über den Funk-Empfänger durchgeschleift. Selbst bei ausgeschaltetem Funk-Empfänger liegt das Signal des Videorecorders an der AV1 Scartbuchse des TV-Gerätes an und Sie können sich jederzeit z. B. Videos ansehen.

Schutz des TFT-Bildschirmes

Bei Nichtgebrauch der **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** sollte immer das beigefügte Etui zum Schutz vor Beschädigungen über den TFT-Bildschirm gezogen werden.

Reinigung des TFT-Bildschirmes

Säubern Sie den Bildschirm nur trocken mit dem beiliegenden Antistatiktuch. Keine Flüssigkeiten verwenden.

Achtung!

In die **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** dürfen keinerlei Flüssigkeiten gelangen. Sie zerstören das Gerät. Bei Nichtbeachtung erlischt die Sachmangelhaftung.

Vorsichtsmaßnahmen bei Änderung der Leistung des Produktes

Sollten sich die technischen und elektrischen Merkmale von **MAXLUPE MINI PLUS** ändern, ist das Gerät auszuschalten und das Steckernetzteil zu ziehen bzw. die Kabelverbindung zur **MAXLUPE MINI PLUS** zu trennen.

Sicherheitshinweise

MAXLUPE MINI PLUS darf nur von Mitarbeitern der Reinecker Reha-Technik GmbH oder einem autorisierten Fachmann geöffnet werden. Bei Nichtbeachtung erlischt die Sachmangelhaftung. **MAXLUPE MINI PLUS** darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen aufgestellt und betrieben werden.

Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Dies kann zur Überhitzung des Gerätes und zur Zerstörung führen.

Achtung bei beim Aufstellen des Gerätes.

Das Kabel für die Spannungsversorgung von **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** beim Laden der Akkus darf nicht zur Stolpergefahr werden. Weisen Sie andere Personen - insbesondere Kinder - auf diese Gefahr hin. Lassen Sie **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** nicht fallen! Sie könnten Sie zerstören!

Hinweise zu Transport und Lagerung

MAXLUPE MINI / MINI PLUS darf aus sicherheitstechnischen Gründen nur in der Originalverpackung versendet werden.

Die Verpackung bitte aufheben. Die Lagerung darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen in der Originalverpackung erfolgen.

Service-Nummer

Sollten mit der **MAXLUPE MINI / MINI PLUS** Probleme auftreten, nehmen Sie bitte sofort unter der **Service-Nummer**

01805 54 56 65 (12 Cent/Minute) mit Reinecker Reha-Technik GmbH Verbindung auf.

Technische Daten MAXLUPE MINI / MINI PLUS

Display

Color TFT LCD

Größe: 3,5 Zoll

Auflösung: 480 (B) x 234 (H) Bildpunkte

Temperaturbereich: 0 Grad Celsius bis plus 50 Grad Celsius

Helligkeit: 350 cd

Steckernetzteil

Eingangsspannung: 100 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Ausgangsspannung: 12 VDC - 1,25 A

Akkus

1 bzw 2 Lithium-Ionen Akkus

Nennspannung: 7,4 V

Kapazität: 1,8 A/ h

Temperaturbereich: 0 Grad Celsius bis plus 50 Grad Celsius

Achtung!

Die Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt oder ins Feuer geworfen werden. Sie sind nach dem Verbrauch an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

Abmessungen

Breite: 215 mm

Tiefe: 75 mm

Höhe: 60 mm

Gewicht

380 g inkl. 1 Akku

480 g inkl. 2 Akkus

Besondere Sachmangel- und Garantiebestimmungen

(Nur gültig innerhalb Deutschlands)

- 1) Die Sachmangelhaftung beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe. Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch Unterschrift auf dem Lieferschein bzw. durch die in der Gebrauchsanweisung eingetragenen Daten bestätigt.
- 2) Die bei einer Reparatur oder Nachbesserung ausgetauschten Teile gehen in das Eigentum der Reinecker Reha-Technik GmbH über.
- 3) Die Garantie- und Sachmangelhaftung umfasst nicht solche Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen.
- 4) Eingriffe durch nicht von Reinecker Reha -Technik GmbH bevollmächtigte Personen lassen den Garantieanspruch und den Gewährleistungsanspruch erlöschen, sofern der Schaden in ursächlichem Zusammenhang mit dem Eingriff steht.
- 5) Die Akkus und die Beleuchtung sind von der Garantie und der Sachmangelhaftung ausgeschlossen, da sie einem naturbedingten Verschleiß unterliegen.
- 6) Bei einer Reparatur oder Nachbesserung muss das Gerät im Originalkarton zu Reinecker Reha-Technik GmbH ins Werk Alsbach-Hähnlein geschickt werden. Porto-, Verpackungs- und Versicherungskosten werden nicht von uns übernommen.

Service-Nummer: 0 1 80 5 54 56 65 (12 Cent/Minute)

Gerätebuch

Typ:	Maxlupe mini	<input type="checkbox"/> 2. Akku
Serien-Nr:		
Typ:	Maxlupe mini plus	<input type="checkbox"/> PAL <input type="checkbox"/> NTSC <input type="checkbox"/> 2. Akku
Serien-Nr.:		
Typ:	Receiver	<input type="checkbox"/> Cinch <input type="checkbox"/> Scart
Serien-Nr.:		
Hersteller: Reinecker Reha-Technik GmbH		
Anschaffungsjahr:		
* Betreiber:	1.	6.
	2.	7.
	3.	8.
	4.	9.
	5.	10.
Endkontrolle:		
Liefer-/Versanddatum:		
Stromanschluss:	100-240 VAC 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme:	ca. 17 Watt	
Bildschirmgröße:	3.5" B = 52 mm, L = 73 mm	
Aufgestellt von:		

*Achtung: Beim Wechsel des Betreibers, den neuen in der nachfolgenden Spalte eintragen

Reinecker Reha-Technik GmbH Zentrale Deutschland + Export

Entwicklung, Produktion, Vertrieb,
Kundenberatung und Kundendienste

Reinecker Reha-Technik GmbH
Sandwiesenstr. 19 • 64665 Alsbach-Hähnlein
Tel. 0 180 5/54 56 65* • Fax 0 62 57/25 61
info@reineckerreha.de
www.reineckerreha.de

*Innerhalb Deutschlands: 12 Cent / Minute

Reinecker Reha-Technik Nederland B.V.

Oudenhof 2d • NL-4191NW Geldermalsen
Tel. + 31 345 - 58 51 60 • Fax +31 34 5 - 58 51 69
info@reineckerreha.nl
www.reineckerreha.nl

Reinecker france S.A.R.L.

215, rue Gallieni
92 100 Boulogne-Billancourt
FRANCE
Téléphone 08.71.53.79.90
Télécopie 01.41.31.35.91
Cellulaire 06.81.68.68.39
reinecker_france@hotmail.fr
www.maxloupe-mini.fr

Reinecker Reha-Technik GmbH Niederlassungen + Fachgeschäfte

Niederlassung Ost

Gottlieb-Daimler-Str. 28 • 07552 Gera-Bieblach
Tel. 0365/4305880 • Fax 0365/4305887
info.gera@reineckerreha.de

Niederlassung Nord

Robert-Koch-Str. 1 • 21423 Winsen / Luhe
Tel. 04171/62929 • Fax 04171/63672
info.winsen@reineckerreha.de

Niederlassung West

Low Vision Köln
Fachgeschäft für Sehbehinderte und Blinde
Aachener Str. 1347-1349 • 50859 Köln
Tel. 02234/40760 • Fax 02234/407625
info.koeln@reineckerreha.de
www.lowvision-koeln.de



Niederlassung Berlin

Low Vision Berlin
Fachgeschäft für Sehbehinderte und Blinde
Köpenicker Str. 125 • 10179 Berlin
Tel. 030/89049780 • Fax 030/89049787
info@lowvision-berlin.de
www.lowvision-berlin.de

Low Vision Darmstadt

Fachgeschäft für Sehbehinderte und Blinde
Rheinstraße 24 • 64283 Darmstadt
Tel. 0 6151 / 159649-0 • Fax 0 6151 / 159649-1
info@lowvision-darmstadt.de
www.lowvision-darmstadt.de

Low Vision München

Fachgeschäft für Sehbehinderte und Blinde
Nymphenburger Straße 22
80335 München
Tel. 0 89 / 45678480 • Telefax 0 89 / 45678489
info@lowvision-muenchen.de
www.lowvision-muenchen.de